


Lettre MED-EL, Octobre 2010

De nombreuses nouveautés en cet automne 2010 :

Nouvelle antenne-D : une plus grande autonomie des piles !

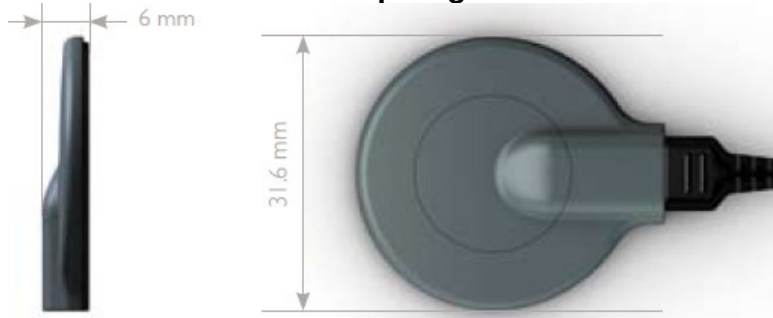

Plus fine mais surtout plus performante, elle vous permettra d'économiser vos piles. Dorénavant, vous pourrez utiliser votre audio processeur jusqu'à 90 heures* soit une semaine d'autonomie. Vous doublez la durée de vie de vos trois piles zinc-air 675. Cette nouvelle antenne augmentera également l'autonomie de votre batterie Da Capo, celle-ci durera toute la journée, jusqu'à 16 heures*, au lieu des 10 heures avec votre antenne actuelle.

**valeurs données à titre indicatifs et peuvent varier d'un utilisateur à l'autre*

Cette nouvelle antenne est dotée d'un nouveau câble plus petit et plus résistant avec un détrompeur pour l'insérer correctement côté processeur (petite flèche rouge) :



Ces antennes sont disponibles en diverses couleurs, toutes plus jolies les unes que les autres :




Vous pouvez, dès à présent, acheter l'antenne-D et son câble auprès de notre bureau Vibrant MED-EL à Sophia-Antipolis.

Le prix de la nouvelle 'antenne-D est de 395,63 € TTC, le câble spécifique à cette antenne D quant à lui, reste au prix de l'ancien câble soit 36 ,93€ TTC.

La nouvelle antenne-D est compatible avec tous les implants et processeurs MED-EL.

Nouvelle stratégie de codage pour votre Audio Processeur OPUS2 :

MED-EL a mis au point une nouvelle stratégie de codage FS4 capable d'apporter la structure fine des sons jusqu'à 1000 Hz ! La restitution de l'enveloppe des sons vous permet de bien comprendre la parole dans le silence, tout comme vous reconnaissez l'image à gauche, ci-dessous, comme un papillon. Grâce au codage de la structure fine des sons, vous pouvez mieux apprécier la qualité des sons, notamment la musique, tout comme vous appréciez la finesse des couleurs et des motifs de ce papillon (ci-dessous à droite).

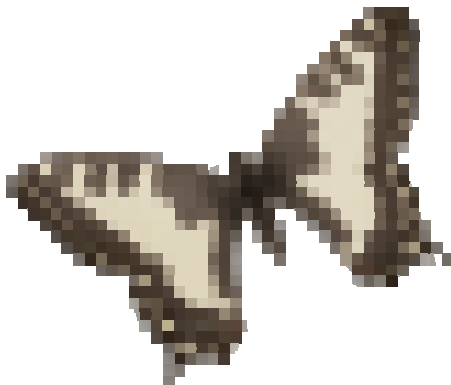

Enveloppe



Enveloppe + Structure Fine

Illustration visuelle de l'enveloppe et de la structure fine des sons.




hearLIFE

Non seulement, la structure fine des sons vous permet de mieux apprécier la musique mais elle permet également de mieux comprendre la parole dans les environnements bruyants.

Pour accéder à la nouvelle stratégie FS4 sur votre Audio Processeur OPUS2 il est nécessaire de faire un nouveau réglage auprès de votre centre d'implantation.

Nouveau site MED-EL en Français !

Vous pouvez désormais accéder à toutes les informations sur les implants auditifs MED-EL en Français sur le site www.medel.com. Un nouveau site MED-EL, avec un tout nouveau design, a vu récemment le jour, pour l'instant en Anglais ; il sera très prochainement disponible en Français. Il offre aux porteurs d'implants auditifs, aux parents et aux candidats, des informations plus claires et mieux illustrées sur les produits et les services offerts par MED-EL.

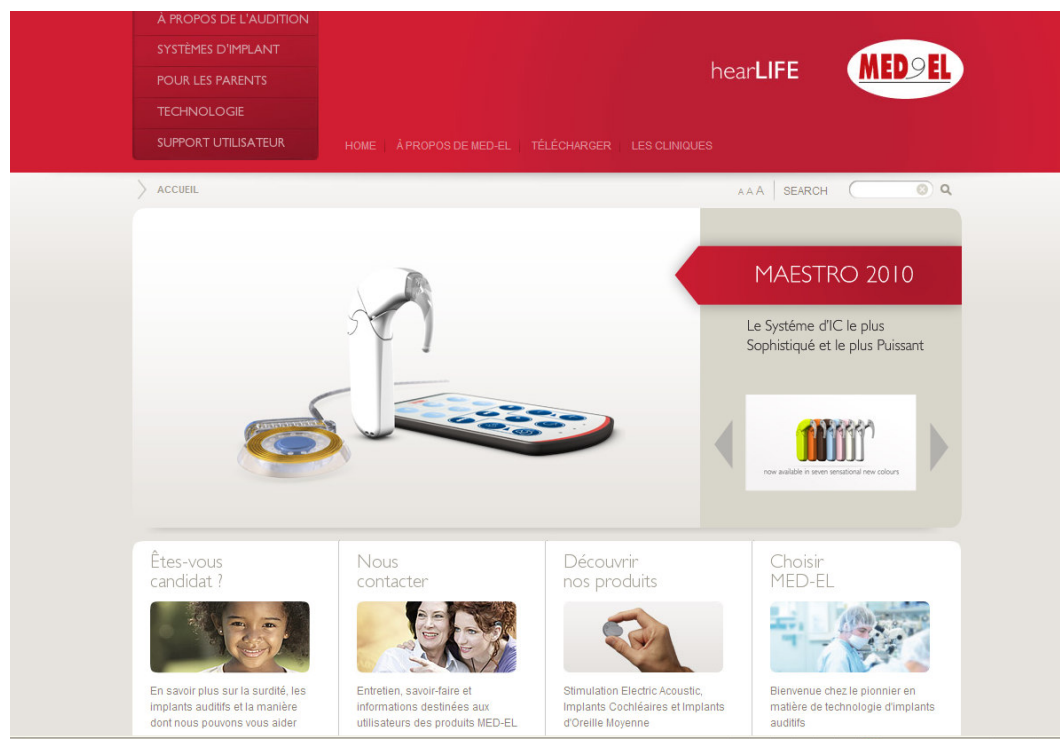

Nouvelle pochette pour la télécommande Fine Tuner !

MED-EL a mis au point une pochette spécialement adaptée à votre télécommande FineTuner. Vous avez également la place d'y ranger une batterie rechargeable DaCapo. Vous pouvez l'acheter dès à présent auprès de notre bureau Vibrant MED-EL à Sophia-Antipolis au prix de 6,90 € TTC.



Nouveau système de séchage électrique très performant !

Afin de mieux éliminer l'humidité des audio processeurs, MED-EL fournit désormais un système de séchage électrique, le Zéphyr. Il a été testé et choisi pour son excellente efficacité. A utiliser tous les jours à la place des tablettes ; vous augmenterez ainsi la durée de vie de votre audio processeur et éviterez les petites pannes.



Vous pouvez l'acheter dès à présent auprès de notre bureau Vibrant MED-EL à Sophia-Antipolis.

Numéro de l'article: 5862, Prix : 40,00 € Ht soit 42,20 € ttc



hear**LIFE**

Nouvelles brochures d'information :

à commander gratuitement chez Vibrant MED-EL

- CD OPUS2 :

Un DVD avec animations en 3D, sur la manipulation de votre OPUS2 (comment changer les piles, brancher les câbles, utilisation de votre FineTuner)

- Zoom Sur : Systèmes d'Implant Cochléaires MED-EL : pour un bénéfice optimal

Pour tout savoir sur les performances des implants cochléaires MED-EL , chez l'adulte, chez les enfants, preuves scientifiques à l'appui !



Zoom Sur

Systèmes d'Implant Cochléaires
MED-EL : pour un Bénéfice Optimal

Ref : 22601.FR

- Implantation Cochléaire Bilatérale :

MED-EL est à la pointe sur beaucoup de domaines alors pour tout savoir sur l'implantation BILATERALE, commander cette brochure qui vous donnera toutes les explications.



Implantation
Cochléaire Bilatérale

UN C'EST BIEN, EST-CE QUE DEUX C'EST MEUX!



Ref : 22760 FR



hearLIFE

- Guide des Parents :

Sur la surdité, et la réhabilitation auditive pour l'implant cochléaire, un guide extrêmement bien fait pour les parents ou les professionnels de l'implant souhaitant une information riche, claire et bien détaillée.



Ref : 22562 FR

VIBRANT MED-EL Hearing Technology

400 av Roumanille - BP 309

F-06906 Sophia-Antipolis Cedex

Tel : +33 (0)4 93 00 11 24 / Fax : +33 (0)4 93 00 11 25

Email : office@fr.medel.com

www.medel.com



hearLIFE

Systeme MAESTRO 2010 de MED-EL

