

L'Artone 3 Max et son boîtier TVB peuvent aussi s'utiliser sur le PC.

Il suffit d'avoir un câble avec 2 fiches jack 3,5 et de brancher le câble sur la prise casque du PC et la prise AUX du boîtier TVB. On trouve ce câble en grande surface au rayon informatique.



Le voyant bleu est allumé quand le branchement est correct (n'oubliez pas de recharger ce boîtier avant ainsi que le collier). Ensuite on met le collier Artone 3 Max autour du cou, les programmes du ou des processeurs sur la bobine magnétique. On fait la même manip que pour l'utilisation sur la TV c'est-à-dire que l'on appuie durant quelques secondes sur le bouton central du collier en étant assez près du boîtier le temps de l'appairage et ensuite cela fonctionne. Les voyants du boîtier et du collier sont bleu. Ensuite il suffira d'appuyer sur le + ou - du collier pour obtenir le volume souhaité.

Quand cela fonctionne, il est possible de s'éloigner du PC de plusieurs mètres tout en continuant à entendre.

Pascale MICHEL 02/10/2019